

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA



Hospital Regional Universitario
CARLOS HAYA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

MANUAL DE CALIDAD


LABORATORIO CLÍNICO

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Código	Fecha emisión/última revisión	Revisado	Aprobado
<i>PAPG 05 Ed 01</i>	18/11/09	Pilar Blanc Iribaren	Dr. Vidal Pérez Valero.
Edición	Fecha próxima revisión		
I			
		Fdo:	Fdo:

PROTOCOLO DE BIENVENIDA PARA EL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN.

ORIENTACIÓN DEL TRABAJO Y SUS RESPECTIVAS SIEMBRAS

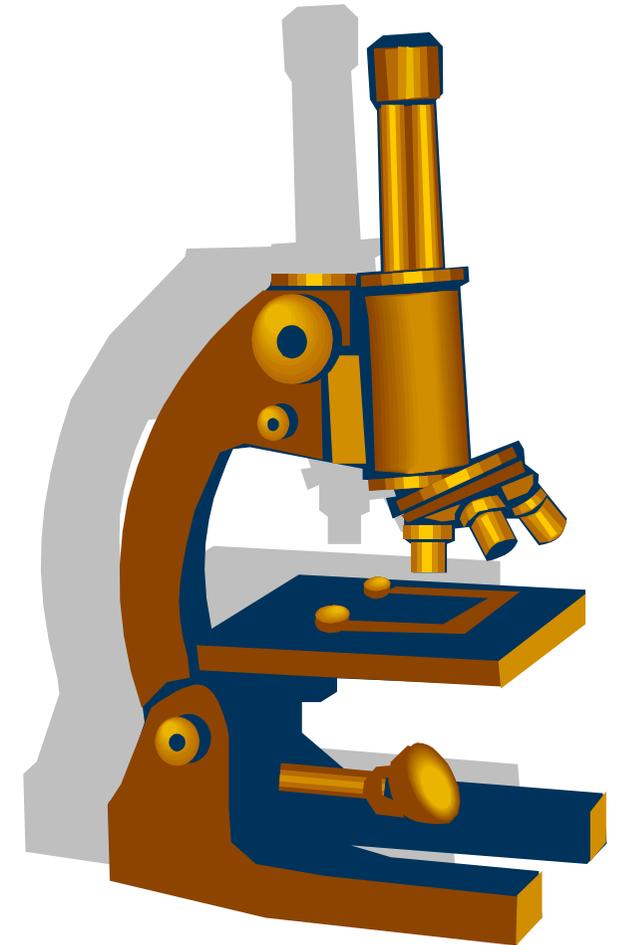

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS
SONDA VESICAL SI HONGOS.....	Rotar en AG Sangre (Aerobio) (Técnica de Maki) THIOGLICOLATO SABOURAUD 30°	ORAL SI HONGOS.....	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO SABOURAUD 30°	CATETER TELESCOPADO	Agitar en el vortex AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30°
UROCULTIVOS SI HONGOS.....	CLED (AEROBIO) (Recuento con asa de 1 microlitro) SABOURAUD 30°	TUBO ENDOTRAQUEAL	Rotar en AG Chocolate (CO2) THIOGLICOLATO	LAVADO BRONCOALVEOLAR (BAL)	AG SANGRE (AEROBIO) (Recuento con asa de 10 microlitros) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30°
HECES	AG SANGRE (AEROBIO) CAMPYLOBATER 42° YERSINIA (AEROBIO) XLD (AEROBIO) S. S. (AEROBIO) SELENITO	ESPUTO	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	PLEURAL SI HONGOS.....	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO ANTG. NEUMOCOCO SABOURAUD 30°
FARINGOAMIGDALINO	AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	ESPUTO F. Q. Incubar 48 horas	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30 °CLED	LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO
NASAL	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	ASPIRADO TRAQUEOBRONQUIAL	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	PERITONEAL Mojar la torunda seca en el Thioglicolato con muestra SI HONGOS.....	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO SABOURAUD 30°
SENOS PARANASALES	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	BRONCOASPIRADO (BAS)	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	DIALISIS PERITONEAL	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) THIOGLICOLATO

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

	SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO			SI HONGOS.....	SABOURAUD 30°
MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS
SINOVIAL O ARTICULAR	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) (Incubar CO2 5 días) THIOGLICOLATO	PERINÉ	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO	SECRECIÓN PROSTÁTICA	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) (Recuento con asa de 1 microlitro) ROIRON
PERICÁRDICO SI HONGOS.....	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO SABOURAUD 30°	ACCESO DE BARTHOLINO	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) (Disco de Gentamicina) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	URETRAL MYCOPLASMA (Si lo piden)	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) ROIRON Hacer antes de inocular el ROIRON
VAGINAL Incubar 48 horas	MARTIN-LEWIS (CO2) AG SANGRE (AEROBIO) GRANADA (ANAEROBIO) ROIRON	LÍQUIDO ANNIÓTICO	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO MYCOPLASMA CHLAMYDIA	SEMEN Si viene de la consulta número 23 (Fertilidad): hacer MYCOPLASMA	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) (Recuento con asa de 1 microlitro) ROIRON
DESPISTAJE ESTREPTOCOCO AGALACTIAE (EGB) VAGINO-RECTAL	GRANADA (AEROBIO) (Con cubre)	LOQUIOS	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	PREPUCIO	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO
ENDOCERVICAL 1ª TORUNDA 2ª TORUNDA	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas) AG SANGRE (AEROBIO) MYCOPLASMA CHLAMYDIA	PERIANAL (EGB) SI HONGOS.....	AG SANGRE (AEROBIO) GRANADA (Con cubre) (AEROBIO) SABOURAUD 30°	ANAL-ETS (Gonococo) OROFARÍNGEO-ETS (Gonococo)	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas)
VULVAR	MARTIN-LEWIS (CO2) (Incubar 48 horas)	ENDOMETRIO	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	CONJUNTIVAL	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS	MUESTRAS	SIEMBRAS
	AG CHOCOLATE (CO2) AG SANGRE (AEROBIO) ROIRON			RASPADO CORNEAL.....	THIOGLICOLATO +SABOURAUD 30°
OIDO EXTERNO	AG SANGRE (AEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO	FÍSTULAS	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO SABOURAUD 30°	HUESOS DE BANCO	THIOGLICOLATO (Añadirlo a la muestra)
OIDO MEDIO	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO	ABCESOS	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) (Disco de Gentamicina) THIOGLICOLATO	TORUNDAS DE BANCO	AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO
ÚLCERAS Y HERIDAS De cirugía plástica y de endocrino (pie diabético)..	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) (Disco de Gentamicina) THIOGLICOLATO Añadir CLED	PUNTA DE CATETER	Rotar en Agar Sangre (Técnica de Maki) THIOGLICOLATO	EXUDADOS NASAL Y PERIANAL (Beca Erasmus)	AG SANGRE (AEROBIO) (Disco de Oxacilina)
CERVICAL	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	BIOPSIA GÁSTRICA (HELICOBACTER PÍLORI)	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE Y UREA (en atmósfera de Campylobacter a 37° durante 4 días) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	RECTAL DE NEONATOS Despistaje de Klebsiella productora de BLEA	CLED (Disco de Cefotaxima)
CELULITIS	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO	BIOPSIAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS Incubar de 3 a 5 días	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO	CONTROL DE CARTÍLAGO	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2) THIOGLICOLATO
EXANTEMAS	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) THIOGLICOLATO	NECROPSIAS Incubar de 3 a 5 días	AG SANGRE (AEROBIO) AG SANGRE (ANAEROBIO) AG CHOCOLATE (CO2)	REHABILITACIÓN: AXILA – OROFARÍNGEO (Despistaje de Acinetobacter)	AG SANGRE (AEROBIO) (Disco Imipenen)

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

		SABOURAUD 30° THIOGLICOLATO		RECTAL (Despistaje de Klebsiella productora de BLEA)	CLED (Disco de Cefotaxima)
PETICIÓN		MUESTRA		TÉCNICA	
VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (VRS)		MOCO NASAL		HACER TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA SEGÚN PROSPECTO	
ADENOVIRUS RESPIRATORIO					
VIRUS INFLUENZA A y B					
ROTAVIRUS		HECES SECAS		HACER TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA SEGÚN PROSPECTO	
ADENOVIRUS					
HELICOBACTER PYLORI					
CLOSTRIDIUM DIFFICILLE		HECES SECAS		HACER TÉCNICA EIA SEGÚN PROSPECTO	

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

PARÁSITOS	HECES CON FORMOL	HACER TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN SEGÚN PNT (Procedimiento normalizado de trabajo)
PETICIÓN	MUESTRA	TÉCNICA
CRIPTOSPORIDIUM	HECES SECAS	HACER EXTENSIÓN EN PORTA Y TINCIÓN DE ZHIEL
	HECES CON FORMOL	HACER TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN SEGÚN PNT (Procedimiento normalizado de trabajo) DEL SEDIMENTO HACER EXTENSIÓN EN PORTA Y TINCIÓN DE ZHIEL
MYCOPLASMA/UREAPLASMA	EXUDADO ENDOCERVIX EXUDADO URETRAL ORINA (SEDIMENTO PRIMER CHORRO) SEMEN	HACER TÉCNICA SEGÚN PROSPECTO
CHLAMYDIA	EXUDADO ENDOCERVIX EXUDADO URETRAL	HACER TÉCNICA SEGÚN PROSPECTO
ANTÍGENO LEGIONELLA	ORINA	HACER TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA SEGÚN PROSPECTO
	EXUDADO PLEURAL	

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE MÁLAGA

ANTÍGENO NEUMOCOCO	ORINA	
---------------------------	--------------	--