



Hospital Regional Universitario  
**CARLOS HAYA**  
Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

## ***MANUAL DE CALIDAD***

## ***LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO***

### **Procedimiento para el Envío al Laboratorio Externo de Referencia la Determinación de Ácido Pirúvico**

<b>Código</b>	<b>Fecha emisión/última revisión</b>	<b>Revisado</b>	<b>Aprobado</b>
<i>PAPG 06 Ed 01</i>	08/07/2013	Spor. Rafael Infantes Viano	Dr. Vidal Pérez Valero.
<b>Edición</b>	<b>Fecha próxima revisión</b>		
I		Fdo:	Fdo:

## **Procedimiento de Envío al Laboratorio Externo de Referencia la Determinación de de Ácido Pirúvico (Piruvato)**

### **OBJETO**

Establecer un sistema de funcionamiento que garantice la correcta recepción y entrega de la muestra para su procesamiento en Laboratorio Externo de referencia

### **DESARROLLO**

Una vez extraída la muestra se enviará rápidamente a la Recepción de muestras donde:

- 1) Se centrifugará, durante 10 minutos a 3.000 r.p.m y se recogerá 2 m.l. del sobrenadante que se añadirá al tubo tapón verde ( 1 ml. Fosfato tripotásico 0.7 mol/l)
- 2) Se mezcla y se deja 15 minutos en un baño de hielo, centrifugar nuevamente durante 10 minutos a 3.000 rpm y separar el sobrenadante en el tubo de envío de suero

El líquido resultante debe ser incoloro

- 3) Se entrega la muestra al personal responsable del envío de la misma al Laboratorio Externo.

### **LISTA DE DISTRIBUCIÓN**

<b>Depositario</b>	<b>Firma del Depositario</b>	<b>Nombre del Depositario</b>
<b>Servicio de Laboratorio Jefe de Servicio</b>		<b>Dr. Vidal Perez</b>
<b>Supervisión de Enfermería</b>		<b>D. Rafael Infantes</b>
<b>Sección de Recepción</b>		<b>Dr. Lillo</b>