



Hospital Regional Universitario
CARLOS HAYA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

MANUAL DE CALIDAD

LABORATORIO CLÍNICO

Protocolo de recepción, distribución y almacenamiento de las muestras de orina

Código	Fecha emisión/última revisión	Revisado	Aprobado
<i>PRR 02 Ed 01</i>	18/11/09	Dr Juan A. Lillo Muñoz	Dr. Vidal Pérez Valero.
Edición	Fecha próxima revisión		
I			
		Fdo:	Fdo:

Laboratorio Hospital Carlos Haya

Procedimientos Preanalíticos

Protocolo de recepción, distribución y almacenamiento de las muestras de orina

En la sección de Orinas se reciben todas las muestras no urgentes, de orinas, heces, cálculos y líquidos seminales procedentes de enfermos hospitalizados (de los pabellones Materno-Infantil, Hospital Civil y hospital General Carlos Haya), de la sala de extracciones, Atención Primaria y Hospitales Comarcales del área de influencia.

1. - Recepción, registro y control de muestras

Registro de Muestras.- las muestras de orina de 24 h y orinas minutadas, orina aislada y heces, se pasaran en la pantalla del control de muestras del SIL de laboratorio (Servolab)

Las muestras procedentes del Pabellón General (Carlos Haya) llegaran con registro de entrada en el SIL (Servolab)

- Las muestras aisladas se enviaran a la sección responsable de la determinación solicitada.
- Las muestras de 24 horas y muestras minutadas (recogidas a tiempo fijo), según la solicitud, se alicuotarán y distribuirán a las secciones de bioquímica específicas correspondientes.

En la sección de orinas, al final de cada jornada de trabajo se sacará una lista de las muestras (orinas de 24 horas y heces) que no han llegado, (muestras de orina de 24 h no recibidas con petición, muestras heces no recibidas con petición) esta información se les pasará a la Unidad de Comunicación para que gestione las no recibidas y las no conformidades a través de la solicitud de nueva muestra mediante información al paciente

2. - Alicuotación y distribución

Una vez registradas, las muestras se separaran en dos rutas

2a. - Muestras aisladas deben dirigirse al analizador de orinas, en esta ruta se incluirán todas la orina a las que le soliciten Anormales ó las que tenga determinaciones de otras áreas (lista de trabajo N° 20, alicuotación y distribución)

2b. - Muestras de Orina de 24 h ú Orinas minutadas se les realizara, medición de volumen, que se reflejara en el sistema informático y la distribución de alícuotas para

otras áreas. En estas se incluirán los tubos recibidos de 10 ml pertenecientes a alícuotas de orinas de 24 h u orinas aisladas a los que le soliciten determinaciones de bioquímica específica.

3.- Distribución de alícuotas:

En las orinas aisladas mediante lista de trabajo y en la pantalla de Servolab (distribución de etiquetas.)

En orinas de 24 h. directamente en la pantalla de Servolab (distribución de etiquetas.)

Se imprimirán cinco tipos de etiquetas dependiendo de las Areas de distribución (Hormonas, Bioquímica MI, Bioquímica CH, Laboratorio Externo y Bacteriología

4. - Almacenamiento y conservación

Las orinas aisladas se almacenaran según las posiciones generadas por el PSM de orinas se conservaran durante 3 días,

Las orinas de 24 horas en gradillas según posición numérica y se almacenaran durante una semana.