



Hospital Regional Universitario  
**CARLOS HAYA**  
Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

**MANUAL DE CALIDAD**

**LABORATORIO CLÍNICO**

**Procedimiento de recogida y etiquetado de Orinas**

<b>Código</b>	<b>Fecha emisión/última revisión</b>	<b>Revisado</b>	<b>Aprobado</b>
<i>PRO 07 A Ed 01</i>	18/11/09	Spsor. Rafael Infantes Viano  Fdo:	Dr. Vidal Pérez Valero.  Fdo:
<b>Edición</b>	<b>Fecha próxima revisión</b>		
I			



Hospital Regional Universitario  
**CARLOS HAYA**  
Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

## Procedimiento de recogida y etiquetado de Orinas

### SECCIÓN DE ORINAS

#### ORINA DE 24 HORAS:

En el bote de 2 l. se le pone en la tapadera una pegatina con código de barra, junto con todas las pegatinas restantes, y en el lateral del bote una pegatina pequeña.

El paciente deberá traer además una muestra para el sedimento, sino es así, se le dará un tubo cónico para obtener una muestra de orina reciente que se etiqueta con el código de barras con la leyenda orina. (Ver ilustración 2)



**Ilustración 1 ORINA DE 24H**



Ilustración 2 : ORINA DE 24 H ( Se pone en el tapón el total de la diuresis )

### ORINA NORMAL: BASICO Y SEDIMENTO

Se le pone al tubo cónico la pegatina con código de barras marcado con la leyenda orina .Siempre desde abajo hacia el tapón.



Ilustración 3 ORINA ( BÁSICO Y SEDIMENTO)

MICROALBUMINURIA: en orina de 24 horas

- Si el paciente trae una muestra de la orina de 24 horas en el tubo cónico, se le pregunta cual es la diuresis total y si ha sido recogida durante 24 h, ésta se anotará en el tubo, el cual se etiqueta con una pegatina con código de barras. Si además le piden el sedimento nos entregará una nueva muestra en otro tubo cónico que se etiqueta con código de barras marcado con la leyenda orina.
- Si el paciente no trae muestra se le entrega un tubo cónico para recoger la orina, que se etiqueta con pegatina de código de barra (solamente ) y además se rotula el tubo con la palabra AISLADA o M.



Ilustración 4 MICROALBUMINURIA ( MUESTRA AISLADA )

CALPROTECTINA: Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula en el tapón la letra Calp.



Ilustración 5 CALPROTECTINA ( HECES )

ELASTASA: Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula en el tapón la letra E.



Ilustración 6 ELASTASA ( HECES )

**DIGESTION EN HECES:** Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula en el tapón la letra D.



**Ilustración 7 DIGESTIÓN EN HECES**

**SANGRE OCULTA EN HECES:** Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula en el tapón la letra S.



**Ilustración 8 SANGRE OCULTA EN HECES**

QUIMOTRIPSINA: Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula en el tapón la letra Q.



**Ilustración 9 QUIMIOTRIPSINA**

GRASAS O FENIR: Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula si las heces son de 24h o 72h.



**Ilustración 10 GRASAS O FENIR ( 24 O 72 )**



Ilustración 11 GRASAS O FENIR ( Hay que anotar el peso del envase vacío )

ALFA 1 ANTITRIPSINA: Se pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula con la letra  $\alpha$  1.



Ilustración 12 ALFA 1 ANTITRIPSINA

## SECCIÓN DE BACTERIOLOGIA

CULTIVO DE ORINA: Se le pone al tubo cónico una pegatina con código de barras de cultivo.

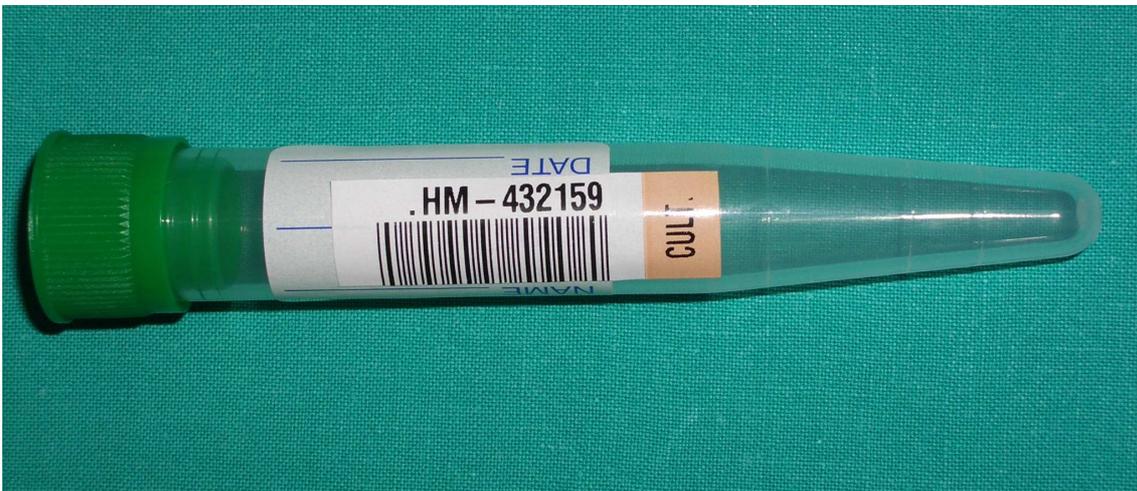


Ilustración 13 UROCULTIVO

**CULTIVO DE HECES:** Se le pone en la tapadera una pegatina de cultivo, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del frasco una pegatina pequeña. Además se rotula con la palabra Heces.



Ilustración 14 CULTIVO DE HECES

**HELICOBACTER:** Se le pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del frasco otra pegatina pequeña. Además se rotula con la palabra Helicobacter.



Ilustración 15 HELICOBACTER

**PARASITOS:** Es la única muestra que lleva formol, por lo que si el paciente trae la muestra en otro frasco la deberá pasar a éste, y siempre que no sobrepase la marca.(tamaño de una nuez). Se identifica el lateral y en el tapón con una pegatina pequeña.



**Ilustración 16 PARÁSITOS**

**ROTAVIRUS:** Se le pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pequeña. Además se rotula con la palabra rotavirus.



**Ilustración 17 ROTAVIRUS**

ADENOVIRUS: Se le pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula con la palabra adenovirus



Ilustración 18 ADENOVIRUS

TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE: Se le pone en la tapadera una pegatina pequeña, junto con las pegatinas restantes, y en el lateral del bote otra pegatina pequeña. Además se rotula con la palabra Toxina Clostridium.



Ilustración 19 TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

**CULTIVO DE SEMEN:** Se le pone en el lateral del frasco una pegatina pequeña y en el tapón la de cultivo. Además se rotula semen.



Ilustración 20 CULTIVO DE SEMEN

**CULTIVO DE ESPUTO:** Se le pone en la tapadera una pegatina de cultivo, junto con el resto de las pegatinas, y en el lateral del frasco otra pequeña. Además se rotula con la palabra esputo.



Ilustración 21 CULTIVO DE ESPUTO

EXUDADO FARINGO AMIGDALAR, EXUDADO NASOFARINGEO, EXUDADO DE CAVIDAD ORAL, EXUDADO VAGINAL, LOQUIOS, VAGINO RECTAL, EXUDADO PERIANAL, EXUDADO DE OÍDO EXTERNO, EXUDADO DE OÍDO MEDIO, ÚLCERAS Y HERIDAS: Se le pone alrededor del tubo una pegatina pequeña



Ilustración 21: Torunda con medio de transporte tipo Stuart- Amies

TIRA DE GRAHAN: Se coloca una cinta adhesiva transparente en el porta y éste se identifica con una pegatina pequeña.



Ilustración 22 TIRA DE GRAHAN

VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL: Se le pone una pegatina pequeña en la tapadera, y otra en el lateral del frasco.

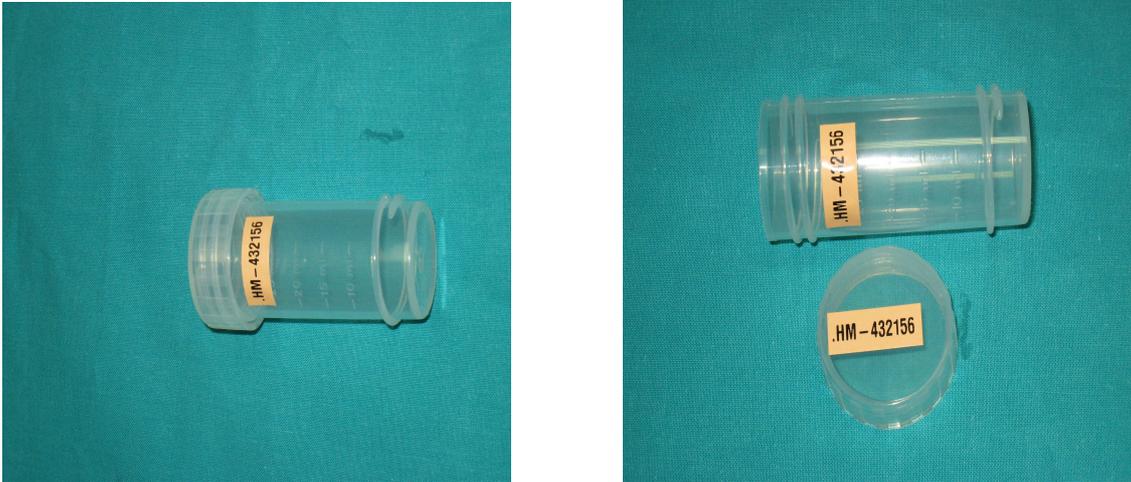


Ilustración 23 VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL

JUGO GÁSTRICO Se le pone una etiqueta pequeña alrededor del tubo.



Ilustración 24 JUGO GÁSTRICO

**NOTA** : Si en la petición hay determinaciones para la sección de orina o de bacteriología se necesitan dos muestras diferentes. Todas las muestras de bacteriología deben ir identificadas con los datos del paciente.

**AUTORES:**

- Sofía Navarrete Pérez.
- Paloma Paneque Molina.
- Rafael Infantes Viano.
- M<sup>a</sup> Victoria Alcántara Alcaide.

**BIBLIOGRAFÍA:**

Manual de recogida y transporte de muestras. Laboratorio de Microbiología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud.

**LISTA DE DISTRIBUCIÓN**

<b>Depositario</b>	<b>Firma del Depositario</b>	<b>Nombre del Depositario</b>
<b>Servicio de Laboratorio Jefe de Servicio</b>		<b>Dr. Vidal Pérez</b>
<b>Supervisión de Enfermería</b>		<b>D. Rafael Infantes</b>
<b>Sección de trabajo</b>		<b>Sala de Extracciones</b>